

Gebrauchsanweisung

GELASPON® STRIP

**Geänderte
Gebrauchs-
anweisung!**

Steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm zur Blutstillung und Wundversorgung.

Gelaspon® Strip **4,0 × 1,0 × 1,0 cm,** **einfach steril verpackt**

STERILE | **R**

Zusammensetzung

100 mg Gelaspon® Strip enthalten 100 mg Gelatine (Schwein)

Chauvin **ankerpharm** GmbH
Brunsbütteler Damm 165–173
13581 Berlin

Telefon: (0 30) 3 30 93-3 00

Telefax: (0 30) 3 30 93-3 50

Gebrauchsanleitung

Gelaspon® Strip ist ein steriler, resorbierbarer Gelatineschwamm. Seine feinporige Struktur aktiviert die Blutgerinnung. Er hat ein hohes Saugvermögen für Blut und Wundsekrete. Gelaspon® Strip hat einen neutralen pH-Wert und ist gut gewebeverträglich. Gelaspon® Strip-Implantate werden in 2–3 Wochen resorbiert. Als Wundauflage löst sich Gelaspon® Strip in 2–3 Tagen auf.

Gelaspon® Strip wird verwendet zur lokalen Blutstillung, zur Blutstillung bei leichtem bis mittelstarkem Nasenbluten, zur Tamponade von chirurgischen Wunden, zur Auffüllung von Gewebedefekten bei operativen Eingriffen oder Zahnextraktionen, zur Wundversorgung oberflächlicher Wunden und zur Wundversorgung beim Ulcus cruris.

Wichtig: Bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten kann Gelaspon®-Fleece/Strip/Schwamm an Volumen zunehmen.

Bedenken Sie daher den Kompressionseffekt auf die umgebenden anatomischen Strukturen, die möglicherweise empfindlich auf Kompression reagieren können.

Gelaspon® Strip wird steril aus der Verpackung entnommen und trocken oder angefeuchtet verwendet. Dabei kann Gelaspon® Strip auf die Größe und Form der Wunde mit steriler Schere zugeschnitten werden. Zur Blutstillung bei Nasenbluten wird ein Streifen Gelaspon® Strip in das betroffene Nasenloch eingeführt. Dabei kann Gelaspon® Strip zum besseren Einführen leicht zusammengedrückt werden. Zur Füllung von Gewebedefekten kann man eine entsprechende Menge von vorher in Stücke geschnittenem Gelaspon® Strip verwenden. Bei der Versorgung des Ulcus cruris sollte Gelaspon® Strip die Ulcusränder mit bedecken.

Nicht benötigtes Gelaspon® Strip darf, nachdem die sterile Verpackung geöffnet wurde, nicht mehr verwendet werden.

Bei Implantation sollte Gelaspon® Strip vor dem Einsetzen mit physiologischer Kochsalzlösung getränkt und nur leicht ausgedrückt werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Wichtig: Drücken Sie Gelaspon® nicht vor Gebrauch zusammen und fügen Sie es nicht fest in Hohlräume ein.

Zur Versorgung trockener Wunden empfiehlt es sich, Gelaspon® Strip angefeuchtet, zur Versorgung feuchter Wunden trocken zu verwenden.

Zur Blutstillung sollte Gelaspon® Strip bis zum Stillstand der Blutung aufgelegt werden. Sollte es beim Nasenbluten auch nach Verwendung eines zweiten Streifens Gelaspon® Strip nicht zum Stillstand der Blutung kommen, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei der Implantation bildet Gelaspon® Strip nach einiger Zeit ein Gel in Verbindung mit dem Wundsekret und wird innerhalb von 2–3 Wochen resorbiert. Bei sezernierenden Wunden bildet Gelaspon® Strip ebenfalls ein Gel, wodurch ein schmerzloser, epithel-schonender Verbandwechsel ermöglicht wird.

Hinweise

• zur Anwendung:

Gelaspon® Strip sollte nicht verwendet werden bei infizierten Wunden bzw. Wundräumen mit entzündlichem Sekret. Bei chirurgischen Hautnähten sollte Gelaspon® Strip nicht aufgelegt werden, da der Heilungsvorgang der Hautränder beeinträchtigt werden kann.


Bei Säuglingen und Patienten mit Bewusstseinsstrübung sollte Gelaspon® Strip zur Blutstillung bei Nasenbluten nur nach Anweisung eines Arztes angewendet werden.

Nebenwirkungen bei der Anwendung sind bisher nicht bekannt.

Nicht verwenden, wenn die Einsiegelung beschädigt ist, da sonst keine Sterilität mehr gewährleistet ist. Gelaspon® Strip darf nicht nachsterilisiert werden. Nicht zur Wiederverwendung.

• zur Entnahme:

Zuerst wird an der Perforation nach mehrmaligem Knicken ein einzelner Blister vom Blisterverbund abgetrennt. Der Einzelblister wird zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand festgehalten. Die Deckfolie wird nun mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand an der Aufreißblase beginnend langsam abgezogen. (Siehe Abbildung)

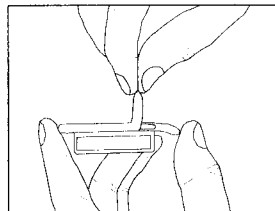

Lagerung

Gelaspon® Strip nicht über 25 °C und trocken aufbewahren. Gelaspon® Strip sollte nach Öffnen des jeweiligen Einzelblisters sofort aufgebraucht werden. Das Verfallsdatum (*Sanduhrsymbol*) dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Primärverpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Datum.

Stand der Information: Oktober 2003

Symbolerklärung:

CE 0123 Freihandelszeichen für „Medizinprodukte“



„Gebrauchsanweisung beachten“



„Nicht zur Wiederverwendung“



„Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt“

GUTE BESSERUNG wünscht Ihnen

CHAUVIN
a n k e r p h a r m

CE 0123

35700107

